

4BC

Kit Hémorragies



CONTENU:

Gants Nitrile, Large / Garrot-Tourniquet /
Pansement compressif d'urgence FCP /
Bande de gaze hémostatique CELOX /
Feutre indélébile



Bande de gaze hémostatique CELOX

Insérez la bande de gaze hémostatique CELOX directement dans la plaie. Colmatez complètement la cavité de la plaie avec l'agent hémostatique CELOX et compressez manuellement durant minimum 1 à 3 minutes. Ensuite, maintenir la pression en appliquant le pansement compressif d'urgence FCP



Pansement compressif d'urgence FCP

Appliquez le pansement sur la plaie pour contrôler les saignements et couvrir la plaie



Garrot-Tourniquet

Appliquez le garrot-tourniquet sur le membre en cas d'amputation ou d'hémorragie grave



Gants jetables Nitrile, Large

Portez toujours des gants



Feutre indélébile



Revit 302101021

Distribué par PerSys Medical, 5310 Elm Street, Houston TX, 77061
T: 713-723-6000 | toll free: 1-866-737-7978
info@ps-med.com | www.ps-med.com

Commercialisé en France/Belgique/Luxembourg par
SILVERT MEDICAL, WTC Lille, 299 Bd de Leeds,
59777 Lille, France | T: 0033 3 59 56 21 26
info@silvermedical.com | www.silvermedical.com



Kit Hémorragies 4BC comprenant :

1 x Bande de gaze hémostatique CELOX RAPID

1 x Pansement compressif israélien FCP-03

1 x Tourniquet SOF Tactical Tourniquet TT-W Wide (Large)

1 x Paire de gants Nitrile Large

1 x Feutre chirurgical indélébile

Emballage aluminium, compartimenté, avec ouverture/fermeture ZIPP-LOCK (permet de reconditionner le kit)

REF : KIT 4BC



BANDE DE GAZE HEMOSTATIQUE CELOX RAPID

Bande pliée en Z, imprégnée de granulés hémostatiques CELOX (Chitosane)

Temps de réaction de l'hémostase : < 60 secondes avec pression manuelle. Pas de réactions exothermiques.

Résorbables. Non-allergène.

Dimensions bande déroulée: 7,5x152 cm

Stérile, à usage unique. Marquage CE.

Réf.: FG08839021

N° OTAN (NSN): 6510-99-184-6453

Dispositif sans Latex



PANSEMENT COMPRESSIF ISRAELIEN FCP-03

Compresse non-adhérente : 10x17cm

Dimensions de la bande élastique : 10X450cm

Bande dotée du Stop&Go (anti-déroulement de la bande)

Poignée de compression intégrée

Clip de fermeture intégré

Emballage : double sachet plastique, sous vide

Stérile, à usage unique. Marquage CE.

Réf. : 100321000

N° OTAN (NSN) : 6510-01-460-0849

Dispositif sans Latex



Tourniquet SOF Tactical Tourniquet TT-W Wide (Large)

Le garrot-tourniquet SOF TT est fabriqué à partir de matériaux de qualité très résistants. La poignée du garrot aluminium.

Sangle de serrage avec boucle auto-blocante.

Œillet de blocage mobile

Dimensions emballé: 15x5x5 cm

Non stérile, réutilisable. Marquage CE.

Réf.: SOF TT-W Wide (Large)

N° OTAN (NSN) : 6515-01-530-7015

Dispositif sans Latex



PAIRE DE GANTS NITRILE

Paire de gants à usage unique en Nitrile, sans poudre.

Taille Large

Non stérile, à usage unique. Marquage CE.

Dispositif sans Latex



FEUTRE INDELEBILLE

Feutre chirurgical indélébile, pour le marquage de l'heure de pose du garrot-tourniquet.

Non stérile, réutilisable. Marquage CE.

Dispositif sans Latex



SILVERT MEDICAL sarl | WTC Lille | 299, Boulevard de Leeds | 59777 Lille - Euralille | FRANCE

T +33 (0)3 59 56 21 26 | F +33 (0)3 59 56 21 25 | info@silvertmedical.com | WWW.SILVERTMEDICAL.COM

TVA: FR 523521545041 | RC LILLE: 352154504 | SIRET: 35215450400018 | APE: 5913 | HSBC BANK: 30056-00150-01502140391-40-HSBC FR LILLE