

BOITACOUCOU



**Caisson de formation
à la technique
de friction**



- **Interprétation simplifiée : utilisation d'un agent fluorescent dans le gel**
- **Matériau haute résistance (PVC haute pression)**
- **Pratique : double vue (formateur/utilisateur)**
- **Connection possible à une caméra**

INDICATION

Matériel destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains.

DESCRIPTION DU PRINCIPE

A l'aide d'un témoin fluorescent contenu dans un produit hydroalcoolique spécialement conçu, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction.
ANIOSGEL 85 NPC fluorescent a été spécialement conçu pour l'utilisation à l'aide du caisson.



BOITACOUCOU

Caisson de formation à la technique de friction

MODE D'EMPLOI



1

Prendre la quantité suffisante d'ANIOSGEL 85 NPC fluorescent pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes. Frotter selon la technique de friction hygiénique.



2

Placer les mains dans la caisson.

Analyser le résultat avec le formateur dans la fente de double-visée :

Résultat 1 : Toutes les zones sont fluorescentes. Le gel a été correctement appliqué.

Résultat 2 : Des zones sombres apparaissent. Le gel n'a pas été correctement appliqué. La technique de friction est à améliorer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille : L 52 cm x P 41 cm x H 40 cm

Poids : 3,5 kg

Description :

- Conçu dans un matériau haute résistance en PVC haute pression.
- Matériel équipé d'une poignée de transport et d'une double visée (utilisateur/formateur).

Caractéristiques électriques :

Alimentation: 230 V monophasé + PE 50 Hz / Puissance: 23 VA.

Alimentation :

Par prise normalisée 10/16 A 230 V monophasé + PE 50 Hz, protégée par un dispositif différentiel de 30 mA max.

Éléments électriques :

- 3 LED ultraviolettes 3W.
- 1 prise mâle 2 pôles +PE, avec fusibles 5 x 20 mm (315 mA) et interrupteur.
- 1 cordon secteur 2 pôles +PE.

REFERENCES

Caisson complet.Réf. 0425.044

Caisson complet avec camera....Réf. 0425.044LCD

ANIOSGEL 85 NPC fluorescent

6 flacons de 300 mL..... Réf. 1759.762FG

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi du fabricant de l'appareil.

Pour toute information liée au produit ANIOSGEL 85 NPC fluorescent, se reporter à la fiche technique du produit ANIOSGEL 85 NPC (code 1644) disponible sur demande.

